


- A** Contrelle® Activgard
- B** Křídélka
- C** Středová jamka
- D** Provázek
- E** Aplikátor
- F** Drážky pro umístění

Contrelle® Activgard

Vyhledejte 'Contrelle' na
YouTube a podívejte se na
úvodní video o tomto produktu.

- G** Močový měchýř
- H** Krk močového měchýře
- I** Děloha
- J** Děložní čípek
- K** Močová trubice
- L** Vaginální otvor
- M** Konečník

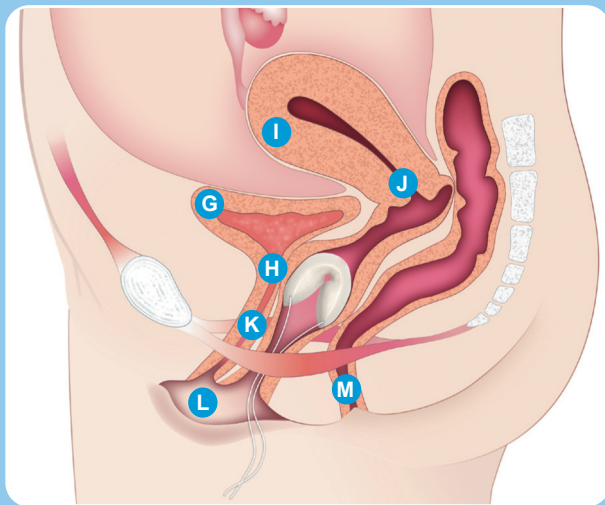

Představujeme Contrelle® Activgard

Navrženo ke snížení nebo
zastavení úniku moči z močového
měchýře.



Navštivte naše webové stránky
www.sab-medical.com
nebo zavolejte našim specialistům:
+420 515 917 511

MKT-0007-04

Contrelle® Activgard

Podpora močového měchýře pro ženy

Podpora močového měchýře pro ženy.

www.sab-medical.com

Příprava


1. Před otevřením balení si důkladně umyjte ruce.




2. Pro otevření roztrhněte obal na obou koncích (označeno barevným proužkem) a vyjměte Contrelle® Activgard. Nepoužívejte nůžky, jinak hrozí přestřížení provázku.




3. Podržte Contrelle® Activgard pod tekoucí vlažnou nebo studenou vodou, přičemž inkontinenční pomůcku přibližně 12krát pevně stiskněte po dobu nejméně 30 sekund, dokud se zcela nenasákne.

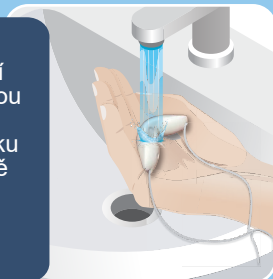

4. Při zmáčknutí dojde ke změknutí a zvětšení Contrelle® přibližně o 30 %. Po úplném nasáknutí vymačkejte přebytečnou vodu. Vezměte prosím na vědomí: inkontinenční pomůcka se může zdát deformovaná nebo nerovnoměrná, pokud není zcela nasáklá. Pokud se tak stane, pokračujte v důkladném mačkání pod tekoucí vodou ještě několik sekund.

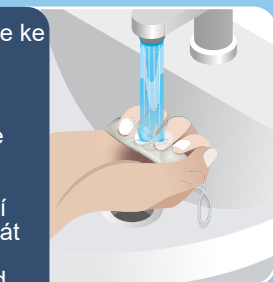


5. Jakmile se pomůcka zvětší a je hladká a rovnoměrná, vyjměte aplikátor pro opakované použití z ochranného pouzdra.

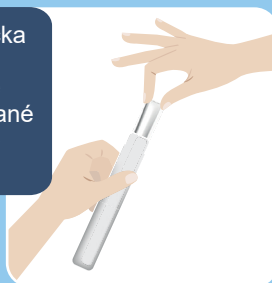

6. Umístěte očko provázku kolem spodní části aplikátoru (v blízkosti drážek pro umístění) s uzlem uprostřed dutiny. Přitáhněte pěnovou pomůcku Contrelle® Activgard k horní části aplikátoru tak, aby středová jamka zapadla do horní části aplikátoru. Vždy nejprve umístěte provázek na spodní část aplikátoru, protože se tak lépe nasazuje na aplikátor.






Držáky pro umístění

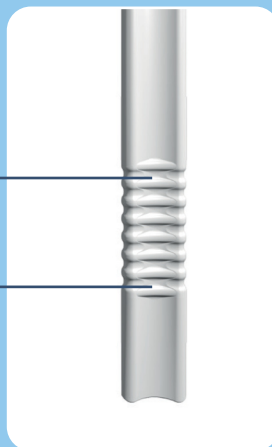


Zavádění a vyjmutí


7. Uvolněte se a najděte si pohodlnou polohu, která vám usnadní zavádění Contrelle® Activgard. Držte aplikátor mezi prstem a palcem na umístovacích drážkách a umístěte Contrelle® Activgard do otvoru pochvy tak, aby křídélka směřovala zepředu dozadu, nikoliv ze strany na stranu ke stehnům. Drážky na aplikátoru vám pomohou správně umístit Contrelle® Activgard a pomohou vám s hloubkou umístění. Každá žena je jiná, a sami zjistíte, která poloha vám nejlépe vyhovuje z hlediska počtu drážek vně těla. Některé ženy zjistily, že použití lubrikantu na vodní bázi u vaginálního otvoru pomáhá usnadnit zavádění.

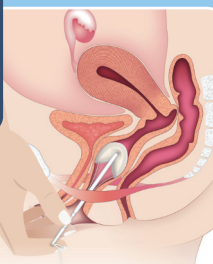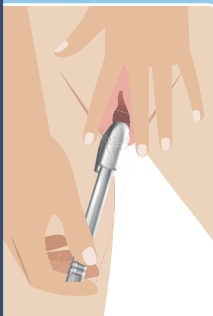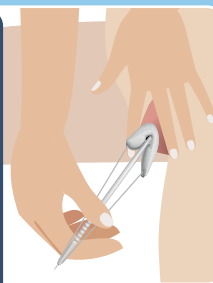

8. Uvolněte šňůrku ze spodní části aplikátoru a vyjměte aplikátor, přičemž šňůrka zůstane venku z těla.

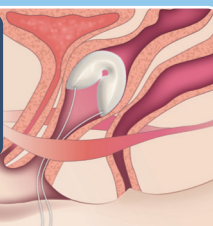


9. Aplikátor omyjte, pečlivě osušte a uložte do ochranného pouzdra připraveného k dalšímu použití.

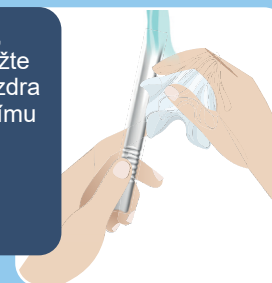


10. Po zavedení si umyjte ruce.

Vyjmutí

11. VŽDY vyjměte Contrelle® Activgard po 16 hodinách nebo po ukončení sportovních aktivit a vždy před spaním.

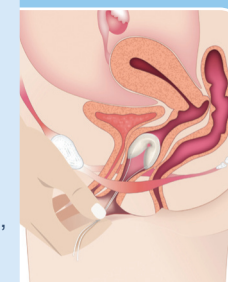

12. Chcete-li Contrelle® Activgard vyjmout, přidržte obě šňůrky (na obou stranách uzlu) co nejbližší k sobě. Pomalu, plynule a opatrně vytáhněte z pochvy. Jemným stažením obou provázků přiblížíte křídélka k sobě pro snadnější vyjmutí. Některé ženy zjistily, že použití lubrikantu na vodní bázi nahoru do pochvy okolo prostředku usnadňuje vyjmutí.

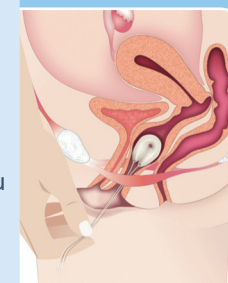

13. Contrelle® Activgard zabalte do kapesníku a zlikvidujte v rámci běžného komunálního odpadu. Nesplachujte jej do záchodu. Contrelle® Activgard nepoužívejte opakovaně.

14. Po vyjmutí si umyjte ruce.

